


KOMPLETNÍ ŘADA PRODUKTŮ PRO BEZPEČNOU HRUDNÍ DRENÁŽ




Healthcare

KENDALL

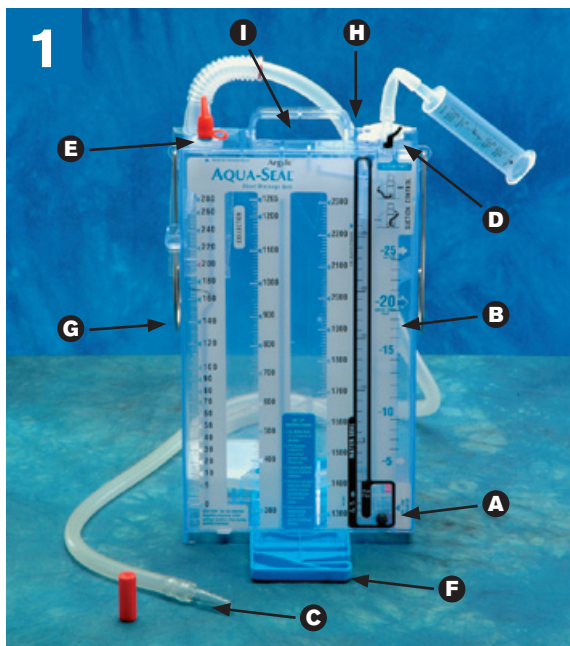


- A** Komora vodního zámku
- B** Komora pro kontrolu sání
- C** Konektor (možno seříznout dle velikosti katetru)
- D** Páčka regulátoru probublávání
- E** Ventil pro uvolnění negativního tlaku
- F** Stojan
- G** Držáky na postel
- H** Ventil pro uvolnění přetlaku
- I** Integrovaný držák

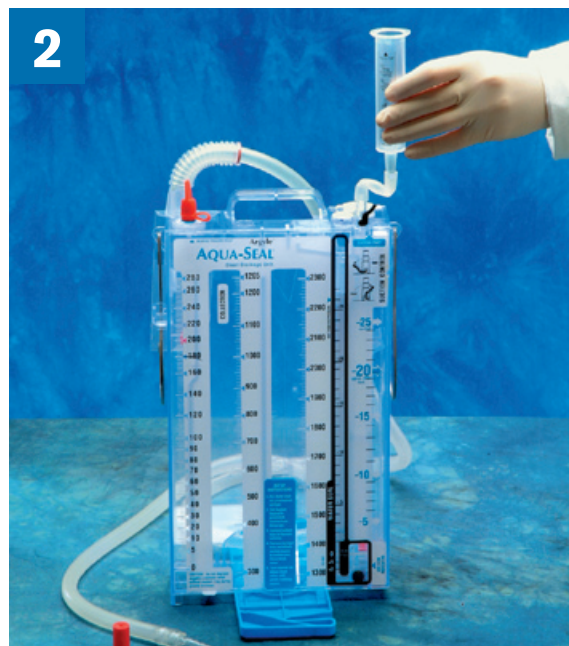

Plnění komory vodního zámku

- Připojenou stříkačku naplňte sterilní vodou (přibližně 45ml)

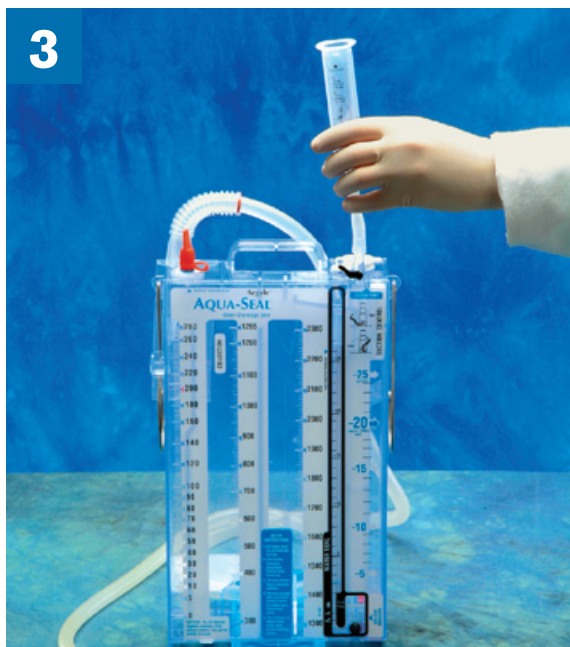

Naplňte komoru vodního zámku

- Zvedněte připojenou stříkačku tak, aby z ní hadičkou stekla voda do komory vodního zámku na úroveň značky 2cm. Voda se zbarví do modra.
- Stříkačku i s hadičkou odpojte od jednotky Aquaseal
- Nyní můžete systém použít okamžitě pro gravitační drenáž
- Pro úpravu výšky hladiny vodního zámku použijte přístupový port na zadní straně jednotky Aquaseal



Naplňte komoru pro kontrolu sání

- Komoru pro kontrolu sání naplňte bílým otvorem sterilní vodou na požadovanou úroveň podtlaku
- Komoru uzavřete připojeným víčkem tak, aby pevně zacvaklo přes okraj vstupu


Aqua-Seal*



Varianta se dvěma separovanými komorami



Pohled zezadu:
Přístupový port pro změnu
hladiny vodního zámku

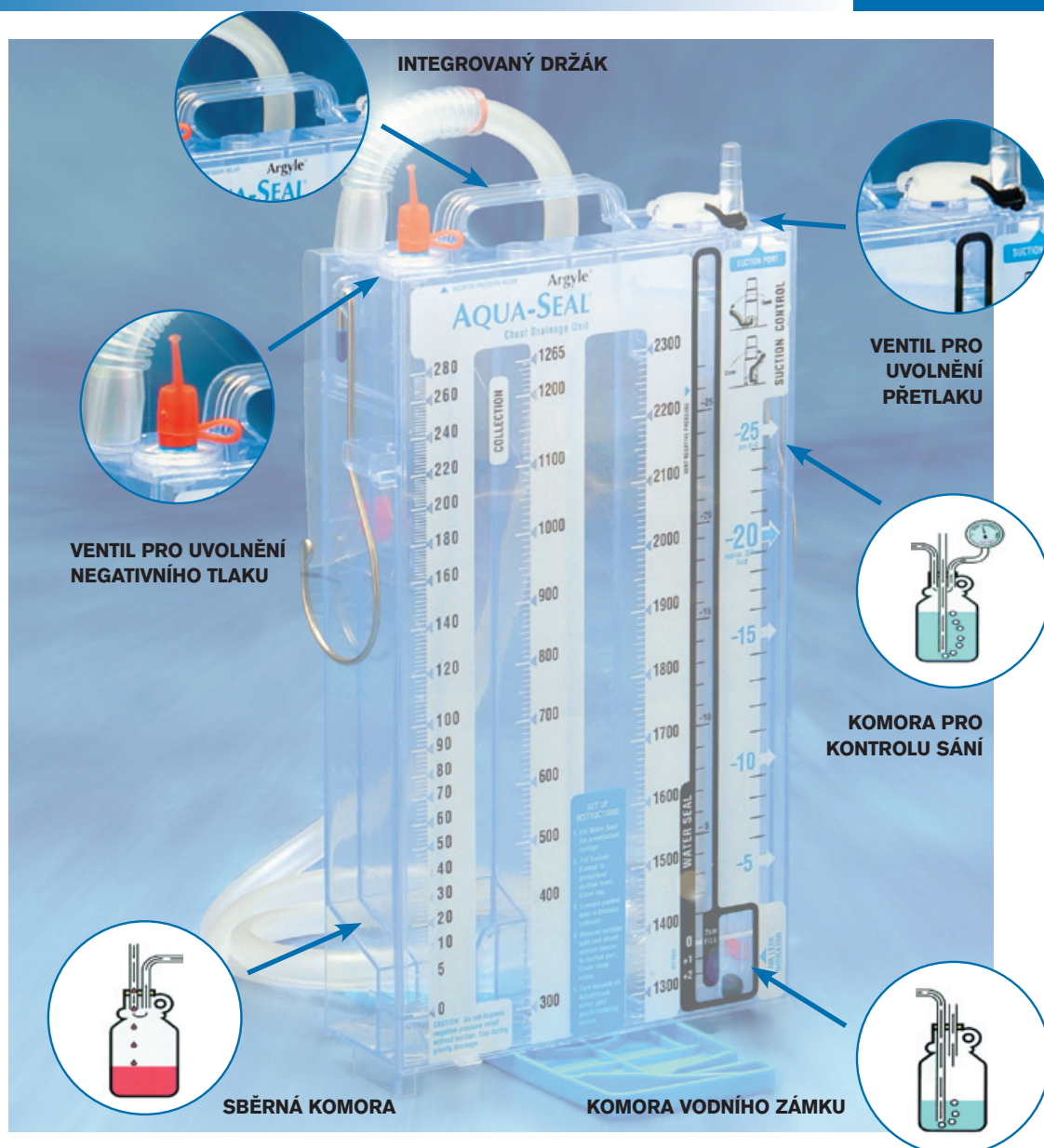

Aqua-Seal* – specifikace výrobku

8888-571299	Aqua-Seal	komora 2300 ml	5 ks v bal.
8888-571406	Aqua-Seal dual	komory 1265 a 1050 ml	5 ks v bal.

tyco
Healthcare

KENDALL

ZASTOUPENÍ A DISTRIBUCE PRO ČR

GPS Praha, spol.s r.o.
Černokostelecká 15, 100 00 Praha 10
Tel: 274779735, Fax: 274775832
Email: gps@kendall.cz



TYCO HEALTHCARE REGIONAL EXPORT

154 Fareham Road
GOSPORT Hampshire
PO 13 0AS, UK
Tel: +44 (0) 1329 224258
Fax: +44 (0) 1329 224086



Připojení k hrudnímu katetru a zdroji podtlaku

- Z konektoru odstraňte ochrannou krytku a připojte hrudní katetr. Podle velikosti katetru můžete konektor seříznout. Spoj fixujte náplastí.
- Hadičku sání připojte k portu podtlaku (po odstranění stříkačky s hadičkou) na pravém horní straně jednotky Aquaseal a zapněte sání. Pro regulaci intenzity probublávání vzduchu v komoře pro kontrolu podtlaku použijte černou páčku.

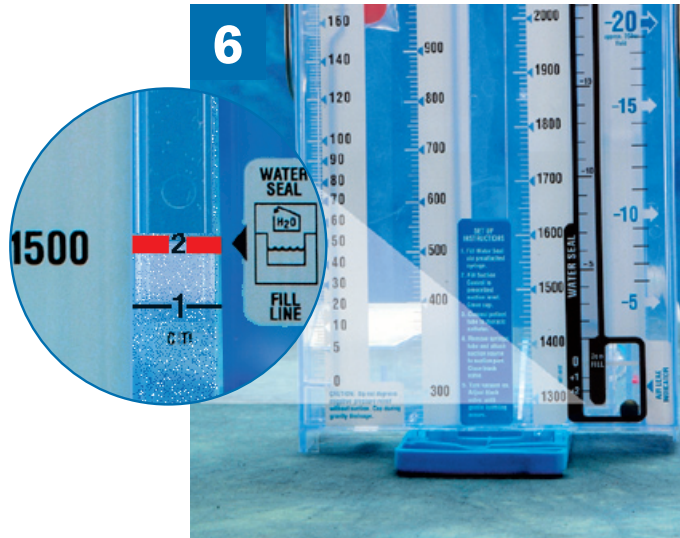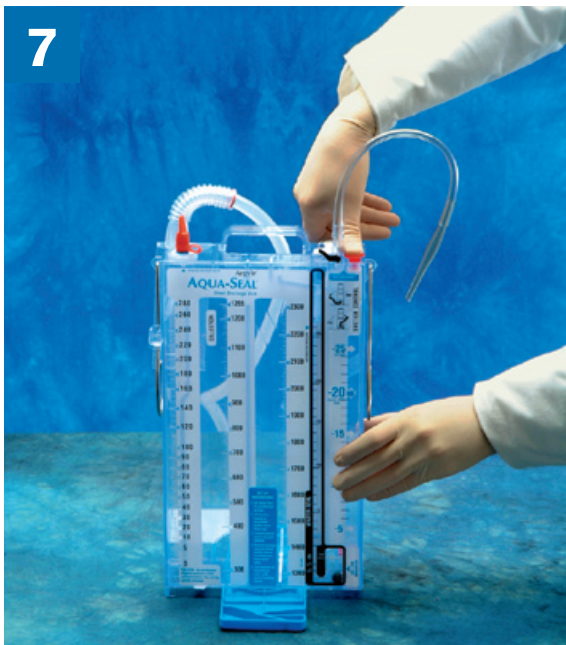

Monitoring pohybu hladiny a probublávání v komoře vodního zámku

pohyb hladiny	probublávání	
ano	ano	plice kolabovaná, pneumotorax, vzduch v pleurálním prostoru
ne	ne	plice reexpanduje, podtlak v pleurálním prostoru, může být pozorován i slabý pohyb hladiny, ověřte, zda není zalomen přívod podtlaku
ne	ano	pravděpodobná netěsnost systému
ano	ne	pravděpodobná pneumectomie, syndrom ztuhlé plicce apod.

By-pass komory pro kontrolu podtlaku

- Potřebujete-li dosáhnout většího podtlaku než je 25 cmH₂O, je nutné obejít komoru pro kontrolu podtlaku.
- Uzavřete otvor v horní části komory pro kontrolu podtlaku pomocí přiložené červené zátky
- Připojte zdroj podtlaku
- Černou regulační páčku otevřete nadoraz (pohyb doleva)
- Podtlak sání regulujte ventilem sání na stěně nebo přenosnou odsávačkou

tyco

Healthcare

KENDALL